

AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ SURGUARD®3 : MODE D'EMPLOI

CE 0197

Basé sur le mode d'emploi daté de 6/2015, RÉV.1

L'AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ TERUMO® SurGuard®3 a été conçue pour être utilisée pour aspirer et injecter des liquides à des fins médicales. L'aiguille hypodermique de sécurité Terumo est compatible avec les seringues régulières Luer Slip et Luer Lock. De plus, après le retrait de l'aiguille du corps, la gaine de sécurité de l'aiguille qui est fixée peut être activée manuellement immédiatement après l'utilisation de l'aiguille afin de minimiser les risques de piqûre accidentelle.




ÉTAPE 1. Serrez la seringue sur l'aiguille en utilisant une technique aseptique. **Saisissez la base de l'aiguille**, pas la gaine de sécurité, et poussez sur la seringue tout en la tournant en sens horaire.



ÉTAPE 2. Écartez la gaine de sécurité de l'aiguille et vers le baril de la seringue, **avec l'angle montré**, avant de retirer le capuchon de l'aiguille. Effectuez l'injection en respectant la technique établie.

(Remarque : la position de l'aiguille « biseau vers le haut » est orientée vers la position de la gaine de sécurité.)

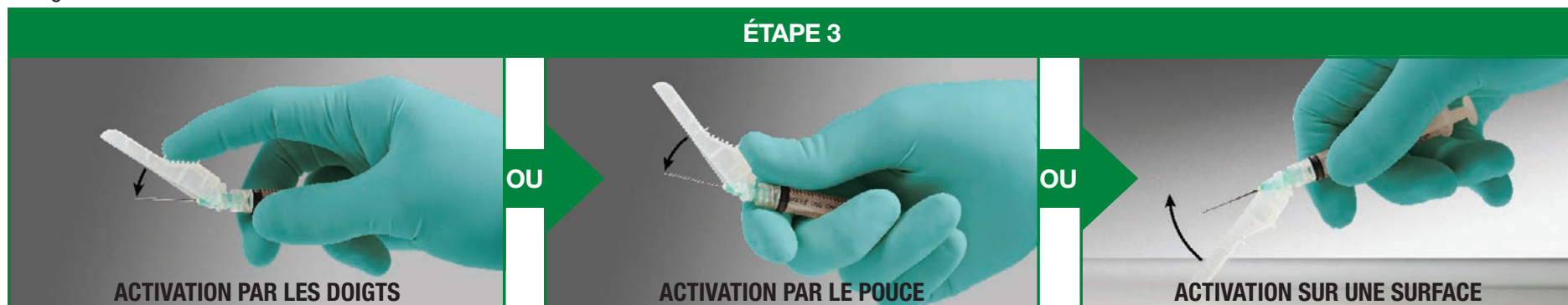

ÉTAPE 3. Une fois l'injection terminée, servez-vous de l'une des trois (3) **techniques à une main présentées** ci-dessus pour **activer le mécanisme de sécurité**. (L'activation est vérifiable par un bruit audible ou une sensation tactile de « clic » et peut être confirmée visuellement.)



ÉTAPE 4. Confirmez visuellement que la gaine de sécurité est pleinement engagée.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 5. Éliminez les aiguilles et le matériel utilisés en respectant les politiques et procédures en vigueur dans votre établissement et en respectant la réglementation fédérale et locale en matière d'élimination d'objets tranchants.

MISES EN GARDE

- MANIPULEZ AVEC SOIN POUR ÉVITER LES PIQÛRES D'AIGUILLE.
- NE REMPLACEZ PAS LE COUVERCLE D'AIGUILLE ORIGINAL APRÈS L'UTILISATION.
- UTILISEZ UNE FOIS ET JETEZ IMMÉDIATEMENT CONFORMÉMENT AUX NORMES DE SÉCURITÉ LOCALES.

MISES EN GARDE

- Si l'aiguille est déformée ou endommagée, vous ne devriez pas tenter de la redresser ni d'utiliser le produit.
- Ne tentez pas de désactiver le dispositif de sécurité en faisant sortir l'aiguille de force hors de la gaine de sécurité.
- À usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser.


PRÉCAUTIONS

- Garder les mains derrière l'aiguille en tout temps durant l'utilisation et l'élimination.
- Observer des précautions universelles sur TOUS les patients.
- Ne pas utiliser le produit si l'emballage individuel ou le produit ont été endommagés ou contaminés.
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.

No. de commande	Description
SG3-1825	Aiguille 18G x 2,54 cm (1 po)
SG3-1838	Aiguille 18 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-2025	Aiguille 20G x 2,54 cm (1 po)
SG3-2038	Aiguille 20 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-2051	Aiguille 20G x 5,08 cm (2 po)
SG3-2125	Aiguille 21G x 2,54 cm (1 po)
SG3-2138	Aiguille 21 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-2225	Aiguille 22 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-2238	Aiguille 22 G x 3,81 cm (1 1/2 po)

No. de commande	Description
SG3-2325	Aiguille 23 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-2338	Aiguille 23 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-2516	Aiguille 25 G x 1,59 cm (5/8 po)
SG3-2525	Aiguille 25 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-2538	Aiguille 25 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-2713	Aiguille 27 G x 1,27 cm (1/2 po)
SG3-3013	Aiguille 30 G x 1,27 cm (1/2 po)

No. de commande	Description
SG3-01T2516	Seringue 1 CC avec aiguille 25 G x 1,59 cm (5/8 po)
SG3-01T2713	Seringue 1 CC avec aiguille 27 G x 1,27 cm (1/2 po)
SG3-03L2025	Seringue 3 CC avec aiguille 20 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-03L2038	Seringue 3 CC avec aiguille 20 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-03L2125	Seringue 3 CC avec aiguille 21 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-03L2138	Seringue 3 CC avec aiguille 21 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-03L2225	Seringue 3 CC avec aiguille 22 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-03L2238	Seringue 3 CC avec aiguille 22 G x 3,81 cm (1 1/2 po)
SG3-03L2325	Seringue 3 CC avec aiguille 23 G x 2,54 cm (1 po)
SG3-03L2516	Seringue 3 CC avec aiguille 25 G x 1,59 cm (5/8 po)
SG3-03L2525	Seringue 3 CC avec aiguille 25 G x 2,54 cm (1 po)

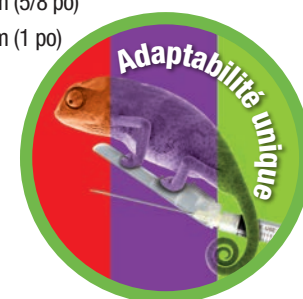

Fabricant TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
124 EAST MAIN AVENUE, LAGUNA TECHNOPARK, BINAN, LAGUNA, PHILIPPINES 4024
ECIREP TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO MEDICAL CORPORATION, 2101 Cottontail Lane, SOMERSET, NJ 08873 États-Unis

TERUMO, TERUMO et SurGuard sont des marques de commerce de Terumo Corporation, Tokyo, Japon et sont enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark Office. ©2015 Terumo Medical Corporation. Tous droits réservés. TMP-0181-02092016

SurGuard®3
AIGUILLE HYPODERMIQUE DE SÉCURITÉ